

karma 康揚

舒弧 205 系列使用手冊

ERG205



CE ISO13485

目 錄


1. 序 言.....	1
2. 使用安全與顧客資訊	1
2.1 警示標誌	1
2.2 使用前注意事項.....	2
2.3 行駛中注意事項.....	2
2.4 顧客資訊	3
2.5 介護人員注意事項.....	4
3. 各部名稱介紹.....	5
4. 操作使用說明.....	7
4.1 拆箱.....	7
4.2 展開.....	7
4.3 安裝反撐桿(選配).....	8
4.4 調整.....	8
4.5 收合.....	9
4.6 如何坐進輪椅.....	9
4.7 如何由輪椅起身.....	9
5. 檢驗與維護	10
5.1 日常檢驗.....	10
5.2 定期保養記錄	11
5.3 運送及儲藏	12
5.4 一般保養.....	12
6. 選購配件(請洽經銷商選購).....	12
7. 問題解決	13

8. 規格表.....	14
8.1 靜態穩定測試報告	14
9. 清潔與資源回收.....	15
9.1 一般清潔.....	15
9.2 資源回收.....	15
10. 保固說明與售後服務.....	15
10.1 保固內容	15
10.2 保固條件	16
11.3 保固排除條款.....	16
10.4 本公司不負擔的費用	16
10.5 保固的繼承.....	17

1. 序言

本產品適用於行動不便及老年退化之移動輔具。感謝您購買本公司鋁合金輪椅。
以下幾點請詳細閱讀：

- 1.1 此使用手冊，記載了安全使用的正確操作方法及簡單的保養、檢修事項。
- 1.2 使用前，請仔細閱讀此使用手冊。尤其是使用安全的部分，所記載的事項是為了確保安全的重要內容，請務必詳細閱讀。
- 1.3 此使用手冊閱讀後，請放置於規定的位置(座椅背墊袋中)，萬一在使用中有不明白之處或不妥的情形發生時，方便取出確認。
- 1.4 此使用手冊是商品的一部份，若顧客有將此車轉手於另一顧客時，請同時將此使用手冊一併交付。
- 1.5 若有不明白或不妥之處，請儘早與購買的經銷商洽談或直接與本公司聯絡。
- 1.6 請認真閱讀保固卡，確認背面的銷售店名、蓋章，並請妥善保存。
- 1.7 因品質改良或設計變更等情況，此使用手冊所記載的文章、插圖會與實際稍有不同之處，本公司保有修改的權利。
- 1.8 重要事項：在未經專業人員解說或未閱讀、瞭解此手冊前，請勿嘗試操作行駛，以免發生危險。

 注意	選購及使用輪椅前請諮詢專業醫師/復健師/治療師以挑選更合適產品及正確使用，為確保安全使用本產品若因使用者個人特殊心理/生理/位移狀況(例如截肢者、不穩定坐姿者、躁動者..)或環境因素，而有導致輪椅傾斜或使用者坐姿不穩的風險時，請扣上骨盆帶或更進一步加裝其他安全裝置。
---	---




2. 使用安全與顧客資訊

★請務必閱讀：

剛開始不熟悉產品時，都會特別注意使用，但是日漸習慣後就會疏忽。請務必遵守注意事項，安全地使用本產品。

2.1 警示標誌

請務必詳讀此說明書，注意警示標誌並詳加閱讀，以確保安全。

	不當使用，將導致死亡或嚴重傷害。
 注意	不當使用，將導致傷害或輔具損壞。
 建議	遵守本手冊的使用法則，以使本車保持良好狀況。

2.2 使用前注意事項

- 2.2.1 每次坐進輪椅或由輪椅起身時，請不要站在腳踏板上，以免發生危險。
- 2.2.2 在駕駛未習慣前，請在公園等安全寬廣的場所練習，且建議介護人員在旁協助。
- 2.2.3 請認真檢查輪椅所有零件是否穩固。
- 2.2.4 當使用充氣輪胎時，請保持指定的胎壓。胎壓異常時，可能造成行駛上的不平穩，影響行車安全。（正確胎壓，請參考輪胎側面的標示）。
- 2.2.5 本車已通過多項 ISO 7176 測試，但為確保各種情況使用，建議加裝反撐杆(選配)。



若您選擇扶手可後掀/全拆或腿靠可拆卸配置之輪椅，欲抬動此產品時，請注意勿抬扶手 / 腿靠或其他可拆移的配件，以免脫落，造成不可預計的傷害。

2.3 行駛中注意事項

- 2.3.1 此輪椅安全載重是 100 KG，請勿於地面斜坡角度超過 7 度安全範圍外的環境使用本產品。請避免於高臺階、溝渠橫走或斜行於陡峭的傾斜地。若必須橫走或斜行於陡峭的傾斜地，則傾斜地角度不要超過 3 度，以確保安全。必要時，請要求介護者協助或加裝反撐桿，以確保安全。
- 2.3.2 行駛於下坡時，請以「後退方式」移動，較為安全。（如右圖）
- 2.3.3 在安全的場所充分練習、使用時，請與介護者同行，在確認安全的情況下行走。
- 2.3.4 在戶外使用輪椅時，請務必遵守行人交通安全法規。
- 2.3.5 請行走於人行道路及斑馬線，並靠右通行。
- 2.3.6 請避免蛇行或急速回轉。
- 2.3.7 請避免輪椅接近火源，以防止危險發生及輪椅的損壞。
- 2.3.8 請避免在下列情況或場所下行走，若必要，請務必與介護者同行。
- 2.3.9 惡劣天候（雨天、濃霧、強風、下雪等），萬一淋濕時，請立即將水分擦乾。
- 2.3.10 惡劣道路（泥濘、雪道、沙子路面、碎石路面等）。
- 2.3.11 交通流量大的道路。
- 2.3.12 道路兩旁設有排水溝或池塘等，且無加蓋或護欄等安全設施之場所。
- 2.3.13 必須穿越鐵路平交道時，請遵守鐵路平交道法規。行駛至平交道路口時，請停止，確認左右安全無誤，且車輪不會卡陷於軌道後，再行通過。在跨



越橫溝或裂縫空隙等障礙物時，請按此要領操作。



建議

若有前輪卡陷的風險，建議以後退方式前進（例如：穿越鐵軌、進出地鐵車廂等等）。



注意

欲通過鐵道、裂縫空隙及任何障礙物時，請確實與其呈直角的方式前進，且強烈建議介護人員在旁協助。

2.3.14 請避免跨越高臺階。若必要，跨越臺階時，請務必與臺階成直角行進，且需有介護人員協助下跨階。

2.3.15 若選擇背對下坡，則請確認有相關介護人員在場。

2.3.16 請勿使用本車搬運物品及牽引用途上。

2.3.17 不使用時，請置放於安全場所，扣緊手剎車，並視實際狀況收合。

2.3.18 使用者自行操作時，請緩力推行，勿強力推行，避免瞬間推行力道過大，造成使用者重心後移，導致輪椅後翻。



2.3.19 本輪椅不能作為機動車輛座椅之輪椅使用。



使用者在任何機動車輛上時，不應該乘坐或使用本輪椅，因為若遇到突發事故或緊急剎車之情況，使用者可能從輪椅被拋出受傷。使用者在任何機動車輛上時，應從輪椅移到機動車輛之正常座位並將輪椅安全固定在車內。

2.4 顧客資訊

我司只提供此手冊所描述的維修與服務，請使用本公司出廠之零件。請注意，我司的使用手冊包含許多注意事項；任何交通工具，若錯誤使用，皆可能造成傷害。不當的使用，可能危害到您自身的安全，也會影響他人安全。請遵循我司的守則，並正確使用您的輪椅。在戶外時，請遵守交通規則，並遵守本手冊中的注意要點。


2.5 介護人員注意事項

- 2.5.1 請確認輪椅在未使用時，剎車為鎖固狀態。
- 2.5.2 請確認使用者雙腳是安全的置於腳踏板上，且衣物不會與輪子接觸。
- 2.5.3 推動輪椅時，請雙手同時轉動手扶圈，介護者務必將雙手置放在推手上，切勿以單手操作，以免方向偏離。
- 2.5.4 下坡坡度過大時，建議介護人員以「後退方式」下坡，並使用介護剎車減速。



本剎車為駐車剎車 (Parking Brake) ，嚴禁輪椅乘坐者於輪椅行進時使用，以免翻覆。介護人員可用雙手拉住車體或輕握介護剎車來剎車、減速。

- 2.5.5 請勿忽然剎車或急停，以免使用者由輪椅上跌落。請依照「行駛中注意事項」所提之要點使用。
- 2.5.6 不可使用會移動的設備或施力於可拆卸零件 (如:拆手/ 拆腳/ 輪子..)的方式來搬運有乘坐人的輪椅。
- 2.2.7 推手之後彎關節，僅提供產品收折時使用，嚴禁關節後彎狀態下使用本產品，以防危險產生。
- 2.2.8 請勿側身彎腰拿取或放下，以免失去平衡而造成側翻。

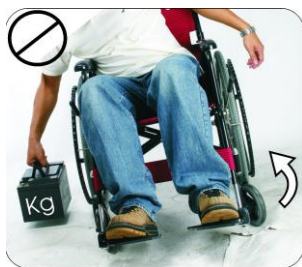

3. 各部名稱介紹

鋁合金輪椅舒弧 205(F14)由鋁合金、塑膠、鋼材組成，使用及清潔輪椅非常容易。
我們建議您瞭解本產品的各部件，以增進使用安全。




- | | |
|---------|---------|
| 1. 推手 | 7. 前輪 |
| 2. 介護剎車 | 8. 背墊 |
| 3. 護板 | 9. 扶手 |
| 4. 剎車 | 10. 座墊 |
| 5. 後輪 | 11. 小腿帶 |
| 6. 座叉 | 12. 腳踏板 |



注意

實際配備以公司出廠為主，若規格配備有修改，本公司不另行通知。

鋁合金輪椅舒弧 205(F20)由鋁合金、塑膠、鋼材組成，使用及清潔輪椅非常容易。
我們建議您瞭解本產品的各部件，以增進使用安全。

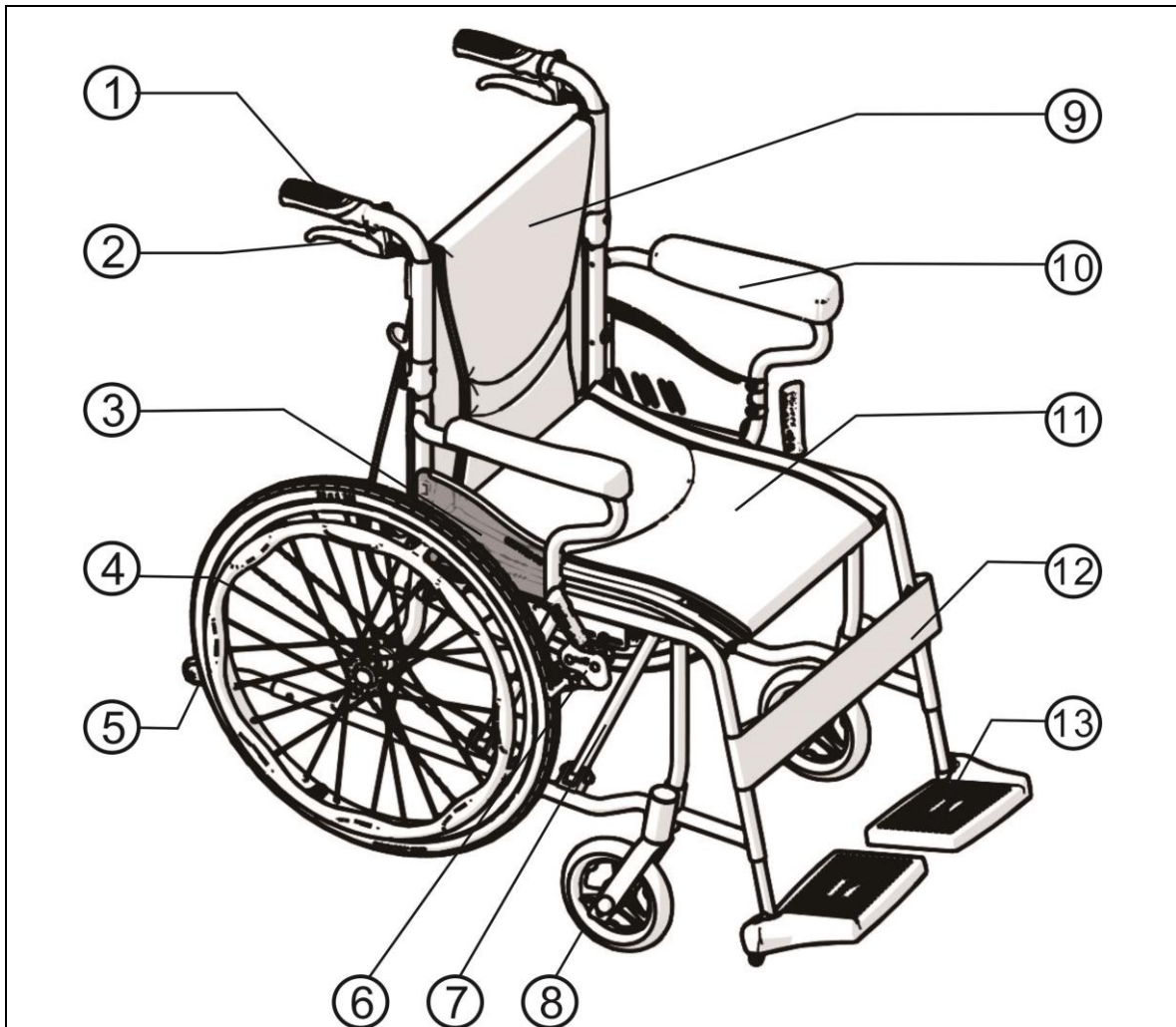

- | | |
|------------|---------|
| 1. 推手 | 8. 前輪 |
| 2. 介護剎車 | 9. 背墊 |
| 3. 護板 | 10. 扶手 |
| 4. 後輪 | 11. 座墊 |
| 5. 反稱桿(選配) | 12. 小腿帶 |
| 6. 剎車 | 13. 腳踏板 |
| 7. 座叉 | |



注意

實際配備以公司出廠為主，若規格配備有修改，本公司不另行通知。

4. 操作使用說明

4.1 拆箱

4.1.1 檢查各部零件是否正常、齊全、無損壞，如零件有損壞或遺漏，請儘速通知您所購買的經銷商或通知本公司，我司將儘快安排人員為您服務。

4.1.2 依組裝說明步驟，將產品調整至定位，以獲得您最佳使用方式。

4.2 展開

4.2.1 向外拉開兩側扶手（如圖 4-1）。

4.2.2 十指向內，慢慢往下壓，必須確認座墊管確實卡入基座（如圖 4-2）。

4.2.3 將腳踏板旋轉下放至定點（如圖 4-3）。

4.2.5 展開完成（如圖 4-4）。



十指務必向內，嚴防夾傷（如圖 4-5）。



圖 4-1

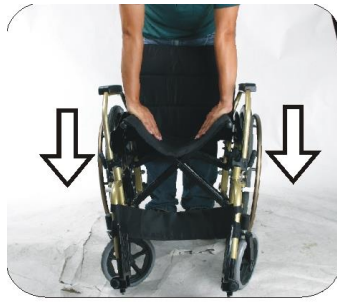


圖 4-2



圖 4-3



圖 4-4


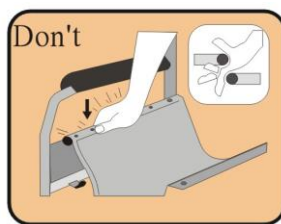


圖 4-5

4.3 安裝反撐桿(選配)

4.3.1 安裝反撐桿時，將後墊管塞移除，反撐桿之彈扣向內，以拇指按壓彈扣將反撐桿插入後墊管內，並確認彈扣跳出後墊管及已裝牢。(如圖 4-6)。

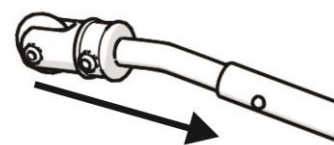

4.3.2 若須移除反撐桿，以拇指按壓彈扣並將反撐桿從後墊管抽出。10 度坡以上建議搭配反撐桿。

圖 4-6



注意

如因使用者個人狀況或者使用環境因素而安裝了反撐桿之後，為確保在各種情況下的安全使用，勿任意拆除反撐桿，否則將可能發生後翻之危險。

4.4 調整

4.4.4 腳踏板長度調整：鬆開踏板底下之螺帽，即可上下調整長度，依乘坐者之腿長，調整至適當之長度時，再將螺帽鎖固即可；注意：離地高至少 5 公分。(如圖 4-7 & 4-8)

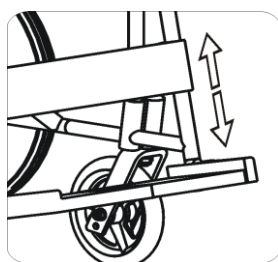


圖 4-7



圖 4-8



注意

執行上述之調整時，請注意使用者的大腿是否平貼於座墊上，此舉可讓身體重量平均分散於大腿與臀部上，避免壓力集中；膝蓋內緣不要接觸到座墊前端，且雙腳必須安全平放在腳踏板上(如圖 4-9&4-10 所示)。



注意

當使用者乘坐於輪椅推行轉彎時，如果前輪與腳踏板末端碰觸，請將升撥腳微微抬昇至適當高度。



圖 4-9



圖 4-10

4.5 收合

- 4.5.1 將腳踏板向上外旋收合 (如圖 4-11) 。
- 4.5.2 雙手從座墊中間向上拉起 (如圖 4-12) 。
- 4.5.3 收折背墊管 (如圖 4-13) 。
- 4.5.4 收合完成 (如圖 4-14) 。(旅行袋組為選配) 。



圖 4-11



圖 4-12



圖 4-13



圖 4-14

4.6 如何坐進輪椅

- 4.6.1 用剎車固定輪椅。
- 4.6.2 將腳踏板掀起。
- 4.6.3 使用者將身體放低，並利用扶手移動身體。
- 4.6.4 緩緩坐進輪椅，不可快速坐下，以避免向後翻覆。
- 4.6.5 將腳踏板轉回原處，並調整至適當高度，讓使用者的雙腳可舒服的放置於腳踏板上。
- 4.6.6 扣上骨盆帶。
- 4.6.7 釋放剎車後即可使用。
- 4.6.8 截肢者、腦性麻痺者...等身體重心平衡狀況特殊者，須由介護者協助安全進出輪椅。而且是否適合使用本輪椅，須由治療師（復健師）診斷與評估。

4.7 如何由輪椅起身

- 4.7.1 確認輪椅與欲移至之目的地的間距已是最短距離。
- 4.7.2 用剎車固定輪椅，並將腳踏板掀起後，拆卸升撥腳。
- 4.7.3 在座位上，將身體移至適當位置。



注意

請務必遵守以下各點

- 4.7.4 扶手只能作起身或坐下時之部分力量依託，不可用全身重量或大角度之側向壓力，防止其損毀或不平衡。

- 4.7.5 為避免輪椅突然前傾，由輪椅坐進或起身時，請不要將腳放在踏板上。
- 4.7.6 只有用剎車固定輪椅時，才可以由輪椅坐進或起身。
- 4.7.7 請勿在斜坡或不穩定的坡面、地形、危險環境周圍，由輪椅坐進或起身。
- 4.7.8 當輪椅上有乘坐人時，在非行進的情況下，請保持剎車為鎖固狀態。
- 4.7.9 當輪椅需被收藏一段時間時，請勿將剎車鎖固，以防止長期壓迫輪胎而導致變形，影響後續輪椅使用。

5. 檢驗與維護

5.1 日常檢驗

在行駛之前，請檢查下列事項，如果發現任何異常，請與本公司人員或所購買的經銷商聯絡，以獲得解決。

項目	檢查內容
輪椅	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 是否有異常聲音出現 ⊙ 零件是否鬆動
輪胎(前後輪組)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 是否有異常聲音出現 ⊙ 零件是否鬆動 ⊙ 是否有破損或胎壓不足 (充氣胎)
剎車	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 是否有異常聲音出現 ⊙ 零件是否鬆動 ⊙ 是否有破損 ⊙ 作動是否正常 ⊙ 是否有效剎車
推手及握把	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 是否有異常聲音出現 ⊙ 零件是否鬆動 ⊙ 是否有破損
反撐桿	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 是否有異常聲音出現 ⊙ 零件是否鬆動 ⊙ 是否有破損 ⊙ 彈扣作動是否正常



注意

若您有發現任何不正常的地方，請立即停止使用，並與本公司人員或所購買的經銷商聯絡，以取得輪椅的維修服務。

5.2 定期保養記錄

為了確保您的輪椅狀況良好，請定期與本公司客服人員聯絡，並做更進一步的輪椅維護及定期保養記錄；我們建議您，輪椅每六個月檢查一次、每年維修一次。保固期限後酌收保養維修費。

下表為輪椅檢查表，請您依下面建議的頻率，進行輪椅檢查；有些檢查需坐進或自輪椅起身，您必須自我進行檢查，以確保使用安全。

自我檢查項目	每星期	每月份
● 一般總體檢查 輪椅直線滑進(非單邊施力)		V
● 骨架及座叉 檢查骨架是否有小裂縫、瑕疵 檢查骨架及座叉是否有彎曲		V V
● 剎車 是否干涉輪椅推行滑進 剎車座機構是否鬆動 是否方便操作、使用 剎車時，輪椅是否依舊會滑動	V V	V V
● 座墊及背墊 檢查是否有撕裂或鬆弛 檢查固定螺絲是否有斷裂或鬆馳	V	V
● 前輪 檢查前輪是否轉動正常 檢查前輪組成(輪叉、培林、輪胎等)是否損壞		V V
● 後輪 快拆軸心是否鎖固正常，必要時加以潤滑 檢查輪軸及輪輻是否正斷裂、彎曲或損傷	V V	
● 扶手 檢查扶手是否斷裂、彎曲或損傷 檢查扶手墊是否穩固或破損		V V
● 靠腳 檢查靠腳是否正斷裂、彎曲或損傷 檢查踏板高度調整螺絲是否正確鎖固		V V

自我檢查項目	每星期	每月份
檢查踏板是否穩固或破損		√
● 輪胎		
檢查輪胎是否有破損或龜裂	√	
使用氣胎者，檢查是否為標準胎壓(胎壓標示於輪胎側緣)	√	
檢查輪胎溝痕大於 1mm(目視外胎表面必須有明顯紋路)	√	



注意 請勿自行拆卸或更改輪椅主要結構，否則可能會引起個人危險或輪椅的損傷，也將會使您喪失保固條件。

5.3 運送及儲藏

5.3.1 建議在運送或儲藏時，輪椅是呈收合狀態且固定剎車。

5.3.2 您可依實際使用狀況進行調整。另請注意在運送或儲藏時，避免太陽直接照射、雨淋或霧水侵襲。

5.3.3 運送或儲藏時，不要放置任何物品於輪椅上，以避免重壓對輪椅產生損害，這將不在保固範圍之內。

5.4 一般保養

5.4.1 輪椅日常維護，主要為輪椅清潔及注意使用狀況。

5.4.2 在行駛經過草地、泥地或碎石路面後，請做保養與清潔。

5.4.3 椅墊清潔請使用軟性清潔劑，以免破壞椅墊材質。其餘表面，請用水或乾淨軟布清擦即可。

6. 選購配件(請洽經銷商選購)

6.1 餐桌板組 (區分 16"和 18")

6.2 減壓坐墊系統 (VICAIR 氣墊)

6.3 骨盆帶

6.4 點滴架

6.5 拐杖架

6.6 反撐桿

6.7 旅行袋組



注意 只有經過本公司認可的配件才可使用。修改或增加的部分，僅限醫療相關器材，且須有專業人員為您進行裝配，並為您未來輪椅的使用負全部的責任。在進行改裝時，請注意增加的重量，是否影響輪椅的穩定性與環境安全性的局限。

7. 問題解決

當您的輪椅遇到問題，在將輪椅送至經銷商前，您可以先行做下列簡單的故障排除：

問題	檢查方法及矯正對策
輪椅左/右傾	<ul style="list-style-type: none">●檢查輪胎是否正常及胎壓是否平均●檢查前輪座總成角度是否正常●檢查後輪空間與座椅骨架空間是否平均
輪動或推動不順暢	<ul style="list-style-type: none">●檢查輪胎是否正常及胎壓是否平均●檢查是否有螺絲鬆弛●檢查輪子轉動是否異常
前輪強烈抖動	<ul style="list-style-type: none">●檢查輪胎是否正常及胎壓是否平均●檢查是否有螺絲鬆弛●檢查前輪座總成角度是否正常
有異常聲音出現	<ul style="list-style-type: none">●檢查是否有螺絲鬆弛●檢查輪子是否銹蝕、轉動異常
輪椅結構鬆弛	<ul style="list-style-type: none">●檢查是否有螺絲鬆弛

上述列出為可能出現問題之項目，提供您參考處理，但我們必須強調，若您對輪椅有任何疑問，經上述檢查仍無法排除異常，基於安全考量，請先暫停使用，並與客服人員或各經銷商聯絡。

8. 規格表

(±10 mm, ±0.5kg)

產品名稱	舒弧 205 配備 14" 後輪		舒弧 205 配備 20" 後輪	
座寬*座深	16"*16"	18"*16"	16"*16"	18"*16"
前/後輪	6"*F14"	6"*F14"	6"*F20"	6"*F20"
座寬 (mm)	410 mm	460 mm	410 mm	460 mm
座深 (mm)	420 mm			
前座高 (mm)	470 mm			
背高 (mm)	390 mm			
扶手高 (mm)	220 mm			
小腿長 (mm)	320 mm~430 mm			
最大荷重 (kg)	100 kg			
單件最重 (kg)	9.8 kg	10 kg	10.8 kg	11 kg
總重 (kg)	10.2 kg	10.4 kg	11.2 kg	11.4 kg
張開尺寸 L(長)*W(寬) (mm) *H(高)	890 mm *570 mm *850 mm	890 mm *620 mm *850 mm	930 mm *570 mm *850 mm	930 mm *620 mm *850 mm
收合尺寸 L(長)*W(寬) (mm) *H(高)	770 mm *310 mm *680 mm		820 mm *310 mm *680 mm	

*實際配備以公司出廠為主，若規格配備有修改，本公司不另行通知。

8.1 靜態穩定測試報告

靜態穩定角度 (ISO 7176-1:1999)		
假人 100 kg	舒弧 205 F20	舒弧 205 F14
向前	15.5°	14.5°
向後	10.5°	12.5°
反撐桿	18.5°	NA
側向	12.5°	12.5°

9. 清潔與資源回收

9.1 一般清潔

為了增長您輪椅的使用壽命，我們建議您週期性地清潔您的輪椅，特別是在行駛經過草地、泥地或碎石路面及有淋雨或水窪地後，請做保養與清潔。我們建議您儘量避免在前述場地或天氣使用。如果無法避免惡劣天氣下使用，我們建議您尋找遮蔽場所，直至氣候改善後再行使用。

9.1.1 骨架

烤漆粉內有添加抗菌劑，清洗時以濕布擦拭即可，若需使用清潔劑清洗時，請使用軟性清潔劑，勿使用有機溶劑或具有侵蝕性液體，如甲苯、廚房清潔劑等，以免抗菌效果降低或無效。

9.1.2 座背墊

布料內有添加抗菌劑，請使用軟性清潔劑，以免破壞椅墊材質。其餘表面，請用水或乾淨軟布擦拭即可。

9.2 資源回收

為了維護地球環境，廢棄車請勿隨意丟棄。本公司鋁合金手動輪椅，所使用的材料大部分皆可回收，相關的回收計畫因應環保局規定。下表為回收參考：

材料	零件	方法
鋁合金	骨架及配件	可回收
塑膠	塑膠墊片、基座、護板、扶手、握把、前輪、後輪胎、座背墊 布料、剎車線外管、腳踏板、手扶圈、管塞等等	可回收
鋼鐵	前輪軸心、後輪軸心、輪圈、螺絲、墊片、螺帽等等	可回收
紙材	使用手冊、吊牌	可回收



建議

請您與您住處附近的資源回收單位聯絡，一同為地球環境盡心力。

10. 保固說明與售後服務

10.1 保固內容

您的鋁合金手動輪椅，皆採用本公司出廠或經本公司認可的零件，若有材料或製造上的不妥適發生時，依本保固所標示的期間及條件，免費修理，此為保固修理。保固修理系指依據零件的更換或修理，更換後的零件歸本公司所有。

10.2 保固條件

- 10.2.1 產品於正常操作情況下，骨架保固期五年，詳情請參照保固卡。
- 10.2.2 消耗品（例：座背墊/輪胎...）不列入保固範圍。除非經本公司專業人員判斷為產品品質問題。
- 10.2.3 本保固條件僅適用於設立營業點的城區市場內。
- 10.2.4 本保固卡在購買的販賣店記入必要事項，蓋印後生效。

11.3 保固排除條款

- 10.3.1 經本公司專業人員認定為無功能及安全上影響的問題(例：異音等)。
- 10.3.2 使用損耗及因經過一段時間的變化而發生的問題，且無安全及功能上的疑慮(例：塗裝面、電鍍面、樹脂等的自然退色劣化等)。

10.4 本公司不負擔的費用

- 10.4.1 消耗零件及油脂類等的更換、補充費用（例：輪胎、各種塑膠製品、潤滑油及其他屬於此類之物件）。
- 10.4.2 檢查、調整、給油、清潔作業等所需的費用。
- 10.4.3 本公司所指定之定期檢查、整理費用。
- 10.4.4 在本公司或銷售店以外，所作的修理費用。



保固注意事項

注意 若未遵守本注意事項，將損及您的保固權益，本公司恕難負責。

- 10.4.5 確認保固卡是否有蓋購買店店章，且妥善保存保固卡。
- 10.4.6 粘貼於產品上的**產品序號**標貼，請妥善維護。
- 10.4.7 請依照本公司指定的時程，進行定期檢查、整理與維護，嚴禁不妥當的保養維護。
- 10.4.8 使用不同於使用手冊等所示的操作方法及超過產品的使用限度。(定員、乘載重量等)。
- 10.4.9 使用非本公司出廠或非經本公司認可的零件。
- 10.4.10 使用於一般輪椅不能行走的場所或特殊的使用狀態。
- 10.4.11 未經本公司認可的改造(車高的變更增設、輪胎的規格變更等)，因而造成的損害或人身傷害。
- 10.4.12 煤煙、藥品、鳥糞、鹽分、酸性雨、飛石、金屬粉等的外在影響因，而導致輪椅受損。
- 10.4.13 颱風、水災、火災、地震等的天災事故，而導致輪椅受損。

10.4.14 非依使用手冊所示操作方法正確使用。

10.4.15 非執行日常檢查。

10.4.16 非執行本公司所指定的檢查整理。

10.4.17 因自行加裝外掛電動助行裝置(如：電動車頭，輪鼓馬達...)，造成人身體傷害或輪椅骨架及零件損壞，本公司恕難負責保固。

10.5 保固的繼承

繼承仍在之保固期間時，請將使用手冊及保固卡移交後續使用者，並到本公司接受必要的檢查及保固的繼承手續，即可擁有剩餘期間的保固。



注意 本保固卡約定，依本使用手冊所明示的期間及條件，免費修理，而過了保固期間後，發生了不妥適的修理，需酌收工本費，請與本公司聯繫。

※ 如有任何疑問請利用以下服務專線：

免付費服務專線：0800 - 522 166

公司電話：05 - 206 6688 分機 212~218

(服務時間：周一~周五 08:30 ~ 18:00)

公司傳真：05 - 206 6699

karma 康揚

藥商名稱：

康揚股份有限公司

KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

藥商地址：

台灣嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號

E-mail:service@karma.com.tw

Tel:05-206 6688 / Fax:05-206 6699

www.karma.com.tw

衛署醫器輸壹字第 004939 號

製造廠名稱：KARMA MOBILITY CO., LTD. (KARMA GROUP)

製造廠地址：30 MOO 7 TAMBOL KHAMYALESO AMPHUR KHAMYALESO
NAKHONRATCHASIMA 30280 THAILAND

衛署醫器陸輸壹字第 001563 號

製造廠名稱：CONCORD MOBILITY CO., LTD. (KARMA GROUP)

製造廠地址：NO.618 GANSHAN ROAD HUZHOU CITY ZHEJIANG P.R.CHINA